


Wondsluiting


Het juist Aanbrengen 3M™ Steri-Strip™ wondsluitstrips




- Zorg voor een schone, droge huid, minimaal 5cm rondom de wond.
- Indien oedeem of beweging rondom het wondgebied aanmerkelijk is, overweeg dan het gebruik van de elastische 3M™ Steri-Strip™.
- Open de verpakking

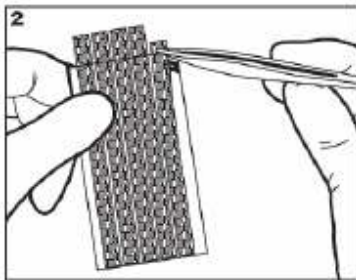

- Stretchmethode Verwijder het kaartje met de hechtstrips op een steriele wijze.
- Buig het kaartje op de perforatie en verwijder voorzichtig de tab.
- Pak een strip met een pincet of met de hand (handschoenen!) en verwijder de strip van het kaartje onder hoek van 90°, dit om oprullen te voorkomen (fig.2).

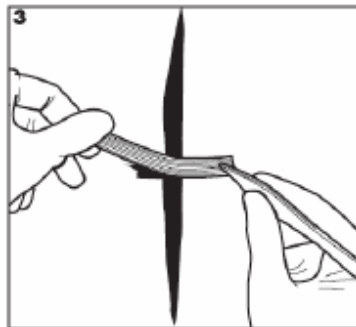

- Wondsluiting start over het algemeen in het midden van de wond.
- Steri-Strip hechtstrips dienen zonder spanning te worden aangebracht.
- Breng één helft van de eerste Steri-Strip aan op de huid en druk deze goed aan.
- Breng de wondranden zorgvuldig naar elkaar toe.
- Breng de andere helft van de eerste Steri-Strip aan op de huid.
- Bij sluiting van de wond met Steri-Strip hechtstrips dient ongeveer om de elke 3mm een Steri-Strip geplaatst te worden.
- Belangrijk is om de uiteinden aan de boven- en onderkant van de wond goed sluitend te krijgen

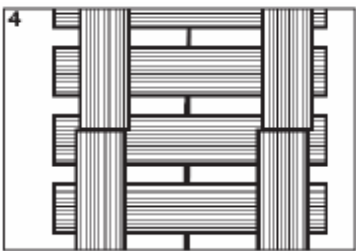

- Het is mogelijk om Steri-Strip wondsluitingen aan te brengen, dwars over de reeds aangebrachte Steri-Strips (spoorrails effect). Dit vermindert tractie op de Steri-Strips, waardoor het risico van mechanisch trauma (spanningsblaren) of het vroegtijdig loskomen van de hechtstrips voorkomen wordt.

Indien overmatige spanning op de huid onder de Steri-Strip wondsluitingen wordt waargenomen, mag de Steri-Strip herplaatst worden onder toezien van een deskundige.

Indien de Steri-Strip loslaat en aan beide zijden van de wond onvoldoende kleefoppervlak heeft, kan overwogen worden de nieuwe Steri-Strip wondsluitingen aan te brengen.

Verwijderen 3M™ Steri-Strip™ wondsluitstrips

- Verwijder de dwarse strips, indien gebruikt.
- Maak de Steri-Strip bij een hoekje voorzichtig los.
- Plaats één vinger op de huid om deze te ondersteunen.
- Verwijder de Steri-Strip hechtstrips voorzichtig richting de wond door de hechtstrip “over zichzelf” te trekken. Blijf dicht bij de huid om mechanisch trauma te voorkomen.
- Blijf de huid gedurende de hele procedure ondersteunen.
- Zodra de Steri-Strip aan beide kant losgemaakt is tot op de wond, verwijder de Steri-Strip door de hechtstrip vanaf de wond omhoog te ‘liften’.

3M Nederland B.V.
Afd. Health Care

Postbus 193
2300 AD Leiden
Tel: 071 5450 386
Fax: 071 5450 688
Email: tegamail@mmm.com